

# Como utilizar recortes de fendas com alinhadores

PÁGINA 1 DE 4

## Materiais e instrumentos necessários para recortes de fendas:



[Alicate perfurador de fenda para alinhador](#)



Elástico



Alinhador transparente

## Para recortes de fendas para a correção de Classe II, consulte o seguinte:

**1. Modifique o(s) alinhador(es) superior(es) para se preparar para a utilização de elásticos com recortes de fendas no alinhador:** Use um alicate perfurador de fenda para alinhador para criar um corte de fenda dupla na margem gengival acima dos caninos superiores e onde o elástico será fixado.



Recorte de fenda dupla acima do canino da arcada superior

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.870\_brpt\_01 01/22

# Como utilizar recortes de fendas com alinhadores

PÁGINA 2 DE 4

**2. Modifique o alinhador inferior para se preparar para a utilização de elásticos com recortes de fendas no alinhador:** Use um alicate perfurador de fenda para alinhador para criar um recorte de fenda dupla na margem gengival abaixo dos molares.



Recorte de fenda dupla abaixo do primeiro molar da arcada inferior

**3. Instalação do elástico:** Insira o alinhador e puxe o elástico sobre a margem gengival entre as duas fendas acima dos caninos. Em seguida, estique o elástico e puxe-o sobre a margem gengival entre as duas fendas abaixo dos molares inferiores.



Recorte de fenda para fenda

**4. Monitore cuidadosamente o progresso da correção em cada consulta.**

O elástico é usado até que a malocclusão Classe II seja corrigida ou levemente corrigida. A sobrecorreção pode ser planejada no setup também para evitar recidivas.

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.870\_brpt\_01 01/22

# Como utilizar recortes de fendas com alinhadores

PÁGINA 3 DE 4


**Para recortes de fendas para a correção de Classe III, consulte o seguinte:**

**1. Modifique o(s) alinhador(es) superior(es) para se preparar para a utilização de elásticos com recortes de fendas no alinhador:** Use um alicate de fenda para alinhador para criar um recorte de fenda dupla na margem gengival acima dos molares superiores e onde o elástico será fixado.



Recorte de fenda dupla acima do primeiro molar da arcada superior

**2. Modifique o alinhador inferior para se preparar para a utilização de elásticos com recortes de fendas no alinhador:** Use um alicate de fenda para alinhador para criar um recorte de fenda dupla na margem gengival abaixo dos caninos.

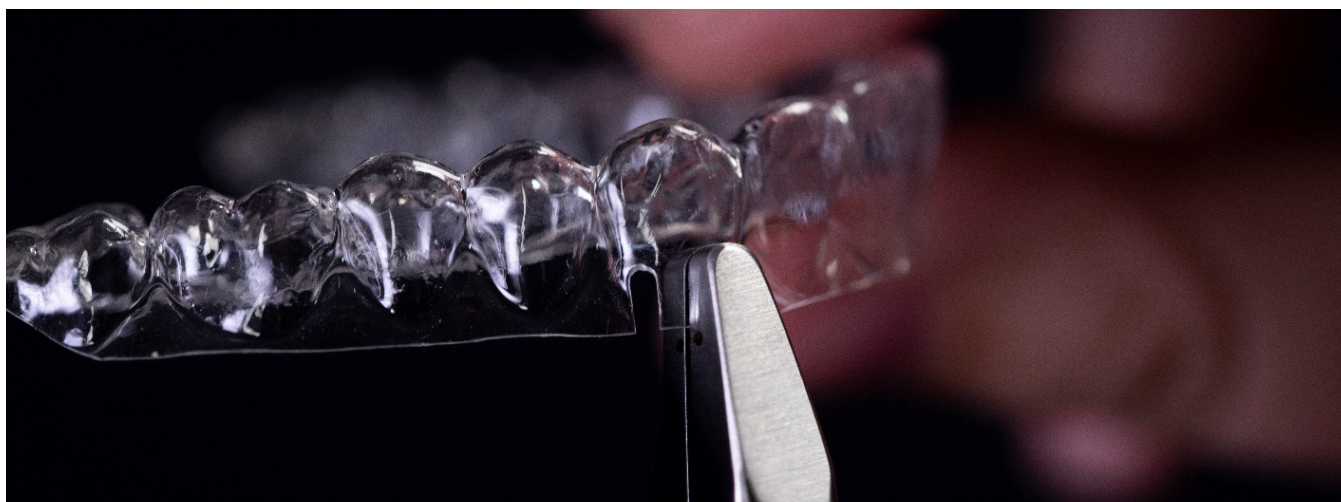

Recorte de fenda dupla acima do primeiro molar da arcada superior

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.870\_brpt\_01 01/22



# Como utilizar recortes de fendas com alinhadores

PÁGINA 4 DE 4

**3. Instalação do elástico:** Insira o alinhador e puxe o elástico sobre a margem gengival entre as duas fendas acima dos molares. Em seguida, estique o elástico e puxe-o sobre a margem gengival entre as duas fendas abaixo dos caninos inferiores.



Recorte de fenda para fenda

**4. Monitore cuidadosamente o progresso da correção em cada consulta.**

O elástico é usado até que a maloclusão Classe III seja corrigida ou levemente corrigida. A sobrecorreção pode ser planejada no setup também para evitar recidivas.