

Comment utiliser les découpes en fente avec les gouttières

PAGE 1 SUR 4

Matériel et instruments indispensables aux découpes en fente :



[Emporte-pièce pour découpe de fente](#)



Élastiques



Gouttière transparente

En ce qui concerne les découpes en fente utilisées aux fins d'une correction de classe II, veuillez vous reporter aux points suivants :

1. Modification de la/des gouttière(s) supérieure(s) pour la/les préparer à l'utilisation des élastiques avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située au-dessus des canines supérieures, à l'endroit prévu pour attacher l'élastique.



Découpe en double fente au-dessus de la canine de l'arcade supérieure

Comment utiliser les découpes en fente avec les gouttières

PAGE 2 SUR 4

2. Modification de la gouttière inférieure pour la préparer à l'utilisation des élastiques avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située sous les molaires.



Découpe en double fente sous la première molaire de l'arcade inférieure

3. Mise en place de l'élastique : insérez la gouttière et placez l'élastique sur l'élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées au-dessus des canines. Ensuite, étirez l'élastique et insérez-le sur l'élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées sous les molaires inférieures.



Découpe pour une configuration fente à fente

4. Suivi attentif de l'évolution de la correction à chaque consultation.

L'élastique est porté jusqu'à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de classe II. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin d'éviter une rechute.

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_fr_01/22

Comment utiliser les découpes en fente avec les gouttières

PAGE 3 SUR 4

En ce qui concerne les découpes en fente utilisées aux fins d'une correction de classe III, veuillez vous reporter aux points suivants :

1. Modification de la/des gouttière(s) supérieure(s) pour la/les préparer à l'utilisation des élastiques avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située au-dessus des molaires supérieures, à l'endroit prévu pour attacher l'élastique.



Découpe en double fente au-dessus de la première molaire de l'arcade supérieure

2. Modification de la gouttière inférieure pour la préparer à l'utilisation des élastiques avec des découpes en fente pratiquées dans cette gouttière : utilisez un emporte-pièce pour découpe de fente afin de créer une découpe en double fente sur la marge gingivale située sous les canines.



Découpe en double fente au-dessus de la première molaire de l'arcade supérieure

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_fr_01/22

Comment utiliser les découpes en fente avec les gouttières

PAGE 4 SUR 4

3. Mise en place de l'élastique : insérez la gouttière et placez l'élastique sur l'élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées au-dessus des molaires. Ensuite, étirez l'élastique et insérez-le sur l'élément de la marge gingivale en le faisant passer entre les deux fentes situées sous les canines inférieures.



Découpe pour une configuration fente à fente

4. Suivi attentif de l'évolution de la correction à chaque consultation.

L'élastique est porté jusqu'à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de classe III. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin d'éviter une rechute.