


# Comment prendre des empreintes en une seule étape

PAGE 1 SUR 2


Nous avons besoin d'empreintes nettes et bien définies des deux arcades pour chaque cas. La précision est importante, car nous allons utiliser ces empreintes pour créer notre modèle 3D et configurer votre plan de traitement. Vous pouvez utiliser la technique que vous préférez, mais nous avons constaté d'excellents résultats en utilisant la technique en une étape illustrée ici.

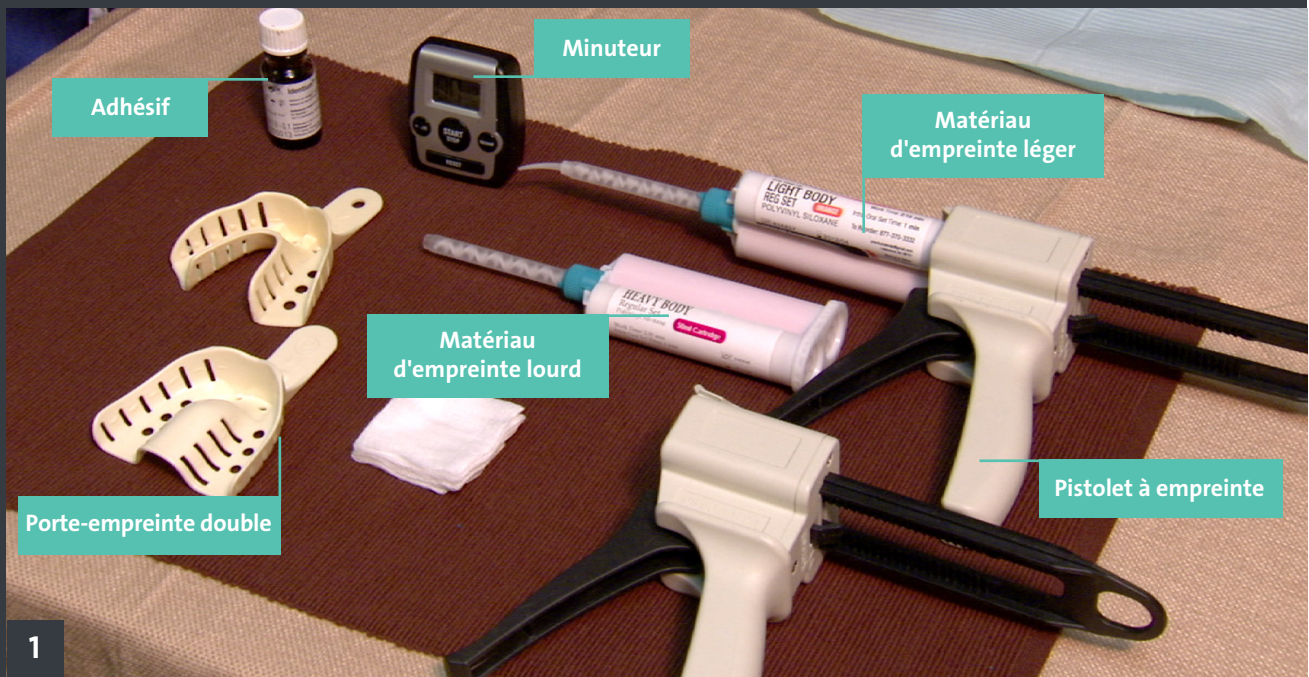

Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin : Matériau d'empreinte léger, matériau d'empreinte lourd (nous recommandons un ensemble standard pour les deux), pistolet à empreinte, deux porte-empreintes, de l'adhésif et un minuteur. En outre, vous pouvez avoir besoin de ciseaux (non illustrés) pour couper l'extrémité de la pointe du corps léger. Vérifiez les instructions de votre matériau d'empreinte pour confirmer le temps de prise intra-orale.



Assurez-vous de disposer d'un porte-empreinte de la bonne taille pour la bouche du patient. Il doit s'étendre au-delà de la dernière dent de l'arcade sans toucher les gencives.

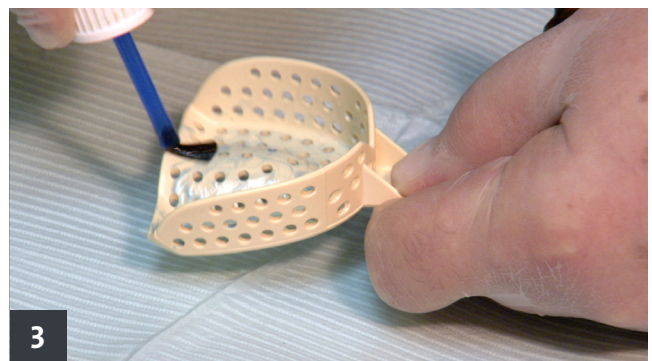

Lorsque vous êtes certain de disposer d'un porte-empreinte de la bonne taille pour la bouche de votre patient, appliquez-lui de l'adhésif. Cela permettra que le matériau d'empreinte reste fixé sur le porte-empreinte lors du retrait de la bouche.


# Comment prendre des empreintes en une seule étape

PAGE 2 SUR 2



4

Placez l'embout mélangeur dans le matériau lourd et remplissez le pistolet à empreinte. Jetez les premiers centimètres de matériau qui surnagent à la surface de l'embout mélangeur. Réglez un minuteur sur le temps nécessaire pour votre matériau, puis déposez le matériau lourd sur le porte-empreinte. Remplissez le porte-empreinte d'un bout à l'autre. Ne retirez pas l'embout du matériau ou vous introduirez des bulles d'air dans l'empreinte.

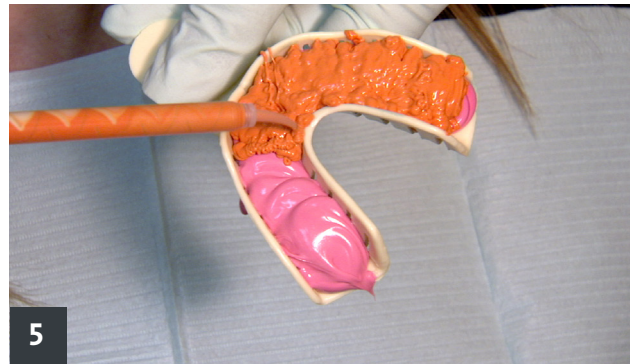

5

Videz le pistolet à empreinte du matériau lourd, puis remplissez-le de matériau léger. Assurez-vous d'utiliser le petit embout car le mélange coulera rapidement.

Remplissez le porte-empreinte d'un bout à l'autre, en recouvrant entièrement le matériau lourd. **Ne surchargez pas le porte-empreinte.**



6

En commençant par le côté distal de la dernière dent de la bouche et en travaillant mésialement, couvrez l'arcade avec le matériau léger. Arrêtez quand vous atteignez les incisives centrales.



7

Passez de l'autre côté de la bouche et, de nouveau, en commençant par le côté distal de la dernière dent et en travaillant mésialement, couvrez le reste des dents de l'arcade.



8

Appuyez le porte-empreinte sur les dents, mais pas trop fort ; vous ne souhaitez pas que les dents passent au travers du matériau d'empreinte et touchent le porte-empreinte. Réglez votre minuteur pour le temps de prise intra-orale du matériau léger et maintenez la pression sur le porte-empreinte jusqu'à ce que l'empreinte soit prise.



9

Lorsque vous vérifiez la qualité de vos empreintes, assurez-vous que :

- Toutes les dents sont clairement enregistrées.
- Il n'y a pas de vides ou de déchirures.
- Au moins 5 mm de tissu gingival est visible
- Aucune dent ne touche le porte-empreinte.