


Modalità di realizzazione di impronte con tecnica monofase

PAGINA 1 DI 2


Abbiamo bisogno di impressioni chiare e ben definite di entrambi gli archi per ogni caso. La precisione è importante, poiché utilizzeremo queste impressioni per creare il nostro modello 3D e impostare il trattamento. Puoi usare qualsiasi tecnica tu preferisca, ma abbiamo visto grandi risultati usando la tecnica "one-step" illustrata qui.

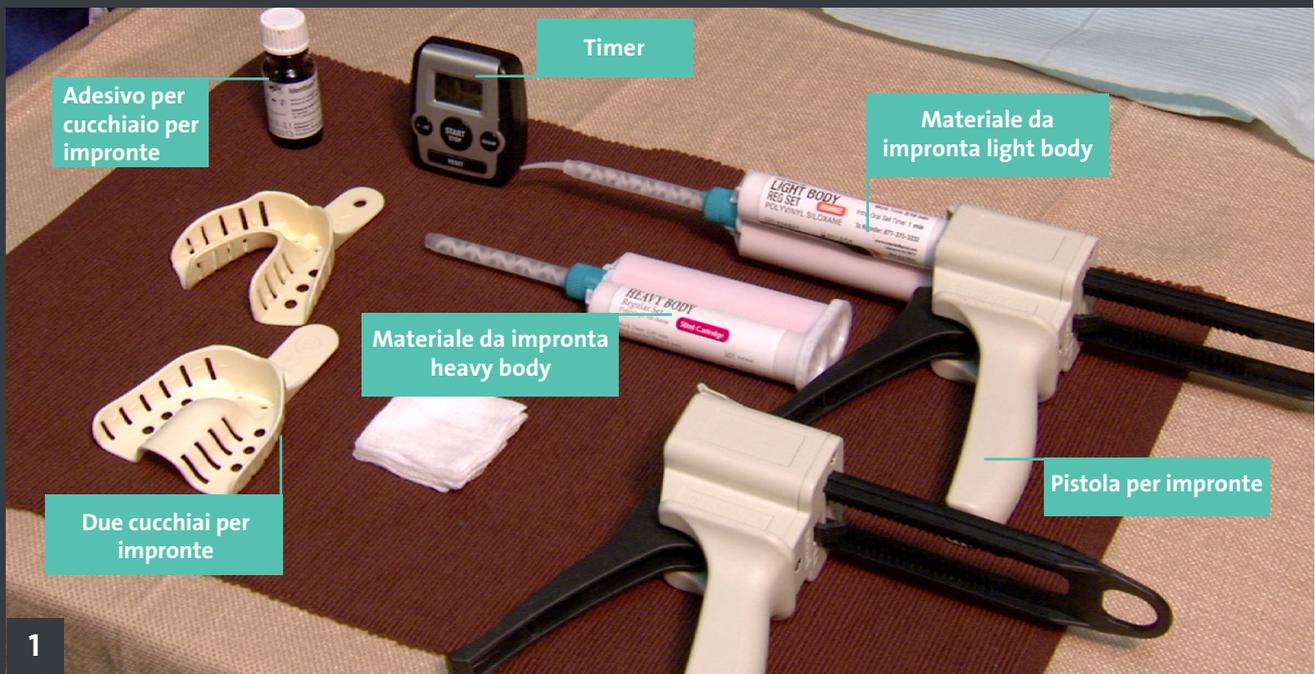

Assicurati di avere tutto ciò di cui hai bisogno: materiale da impronta per il corpo leggero, materiale da impronta per il corpo pesante (consigliamo un set regolare per entrambi), una pistola per impronte, 2 vassoi per impronte, un po' di adesivo e un timer. Inoltre, potresti aver bisogno di forbici (non nella foto) per tagliare l'estremità della punta del corpo leggero. Controllare le istruzioni per il materiale da impronta per confermare i tempi di lavoro e quelli intraorali impostati.



Verificare che il cucchiaio per impronte sia della dimensione giusta per la bocca del paziente. Il cucchiaio per impronte dovrebbe estendersi oltre l'ultimo dente dell'arcata senza toccare le gengive.

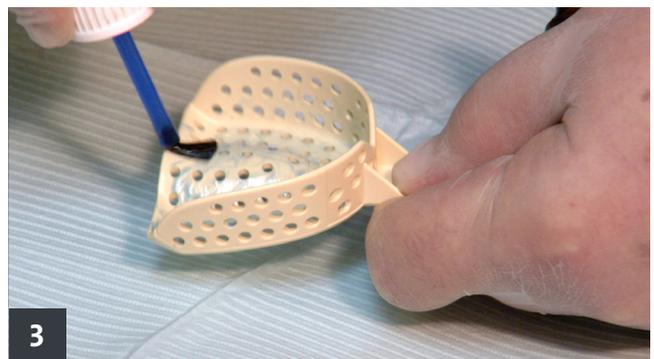

Una volta verificato di disporre di un cucchiaio per impronte della dimensione giusta per la bocca del paziente, applicarvi l'adesivo. Ciò contribuirà a impedire che il materiale da impronta si stacchi dal cucchiaio durante la rimozione dalla bocca.


Modalità di realizzazione di impronte con tecnica monofase

PAGINA 2 DI 2



4

Mettere il puntale di miscelazione nel materiale heavy body e caricarlo nella pistola per impronta. **Scartare i primi 2,5 cm di materiale per ogni nuovo puntale di miscelazione.** Impostare il timer sul tempo di lavorazione del materiale, poi passare il materiale heavy body sul cucchiaio per impronte. Riempire il cucchiaio da un lato all'altro. Non estrarre il puntale dal materiale per evitare la formazione di bolle d'aria nell'impronta.

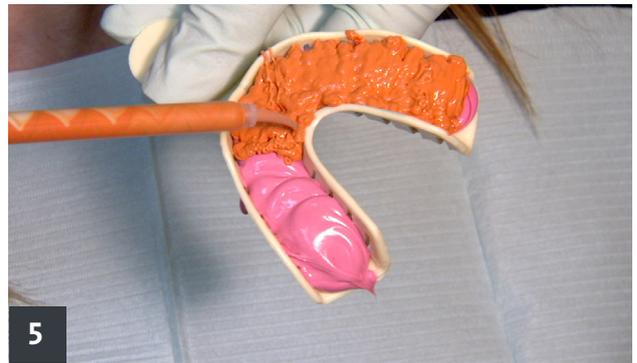

5

Scaricare il materiale da impronta heavy body dalla pistola per impronta e caricare il light body. Accertarsi di usare il puntale piccolo, perché la miscela scorrerà velocemente.

Riempire il cucchiaio per impronte da un lato all'altro, coprendo completamente il materiale heavy body. **Non riempire eccessivamente il cucchiaio.**



6

Iniziando dal lato distale dell'ultimo dente della bocca e lavorando in direzione mesiale, coprire l'arcata con il materiale light body. Fermarsi quando si raggiungono gli incisivi centrali.



7

Passare all'altro lato della bocca e, di nuovo, iniziare dal lato distale dell'ultimo dente e, lavorando in direzione mesiale, coprire il resto dei denti nell'arcata.



8

Premere il cucchiaio sui denti, ma non con troppa forza: i denti non devono attraversare tutto il materiale per impronta e arrivare a toccare il cucchiaio. Impostare il timer sulla base del tempo intraorale prestabilito del materiale light body e mantenere la pressione sul cucchiaio per impronte fino a quando l'impronta non è pronta.



9

Quando si controlla la qualità dell'impronta, verificare che:

- Tutti i denti siano chiaramente registrati
- Siano visibili almeno 5 mm di tessuto gengivale
- Non ci siano vuoti o crepe
- Nessun dente tocchi il cucchiaio per impronte