

# Comment utiliser les découpes pour bouton avec les gouttières

PAGE 1 SUR 5

## Matériel et instruments indispensables aux découpes pour bouton :



Acide phosphorique à 35 %



[Résine pour collage orthodontique](#)



[Bouton en céramique/  
plastique pour les dents  
antérieures afin de  
préserver l'esthétique](#)



[Bouton métallique pour  
les dents postérieures](#)



[Emporte-pièce pour découpe  
circulaire](#)



Élastiques



Gouttière transparente

# Comment utiliser les découpes pour bouton avec les gouttières

PAGE 2 SUR 5

**En ce qui concerne les découpes pour bouton utilisées aux fins d'une correction de classe II, veuillez vous reporter aux points suivants :**

**1. Modification de la/des gouttière(s) pour préparer le collage des boutons :** utilisez un emporte-pièce pour découpe circulaire, ou une fraise acrylique ou diamantée, pour découper et enlever une zone semi-circulaire de la marge gingivale des gouttières située au-dessus de la canine supérieure et sous la première molaire inférieure, à l'endroit prévu pour le collage des boutons.



Découpe pour bouton au-dessus de la canine de l'arcade supérieure

**2. Préparation de la dent à l'aide des protocoles classiques de mordançage et de collage :** mordancez la zone des dents où les boutons seront collés. Rincez l'acide et séchez avec la seringue à air/eau.

**3. Mise en place des boutons :** collez chaque bouton sur le tiers cervical des couronnes cliniques, proche de la marge gingivale et centré sur la dent.

**4. Mise en place de l'élastique :** insérez la gouttière et étirez l'élastique entre les boutons que vous avez posés en vestibulaire.

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.828\_fr\_01/22

# Comment utiliser les découpes pour bouton avec les gouttières



Découpe pour une configuration bouton à bouton



Découpe pour une configuration fente à bouton

## 5. Suivi attentif de l'évolution de la correction à chaque consultation.


L'élastique est porté jusqu'à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de classe II. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin d'éviter une rechute.

# Comment utiliser les découpes pour bouton avec les gouttières

PAGE 4 SUR 5

**En ce qui concerne les découpes pour bouton utilisées aux fins d'une correction de classe III, veuillez vous reporter aux points suivants :**

**1. Modification de la/des gouttière(s) pour préparer le collage des boutons :** utilisez un emporte-pièce pour découpe circulaire, ou une fraise acrylique ou diamantée, pour découper et enlever une zone semi-circulaire de la marge gingivale des gouttières située au-dessus de la première molaire supérieure et sous la canine inférieure, à l'endroit prévu pour le collage des boutons.

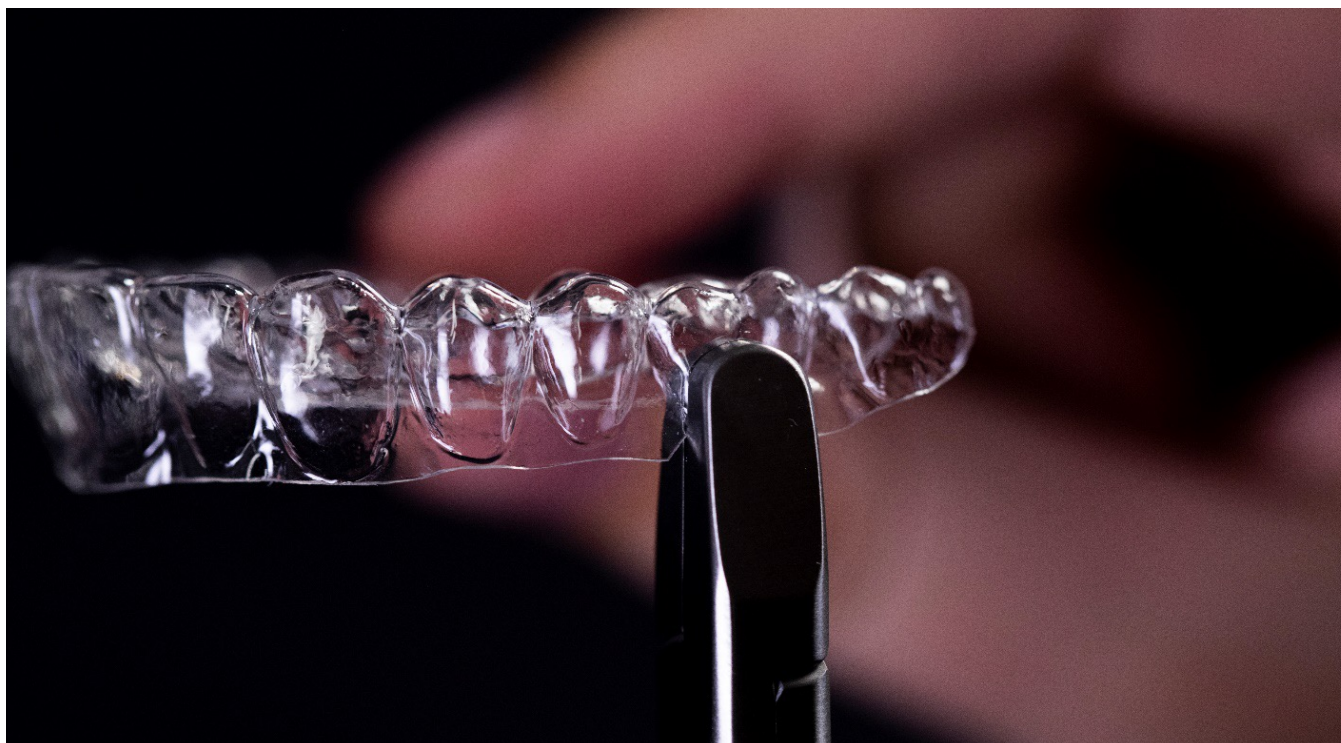

Découpe pour bouton sous la première molaire de l'arcade inférieure

**2. Préparation de la dent à l'aide des protocoles classiques de mordançage et de collage :** mordancez la zone des dents où les boutons seront collés. Rincez l'acide et séchez avec la seringue à air/eau.

**3. Mise en place des boutons :** collez chaque bouton sur le tiers cervical des couronnes cliniques, proche de la marge gingivale et centré sur la dent.

**4. Mise en place de l'élastique :** insérez la gouttière et étirez l'élastique entre les boutons que vous avez posés en vestibulaire.

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.828\_fr\_01/22

# Comment utiliser les découpes pour bouton avec les gouttières

PAGE 5 SUR 5



Découpe pour une configuration bouton à bouton



Découpe pour une configuration fente à bouton

## 5. Suivi attentif de l'évolution de la correction à chaque consultation.

L'élastique est porté jusqu'à la correction complète ou une légère surcorrection de la malocclusion de classe II. Une surcorrection peut également être planifiée lors de la configuration du traitement afin d'éviter une rechute.

**clearcorrect**  
A Straumann Group Brand

480.828\_fr\_01/22