

Come usare gli intagli per bottoni degli allineatori

PAGINA 1 DI 5

Materiali e strumenti necessari per gli intagli per bottoni:



Acido fosforico 35%



[Resina ortodontica per l'incollaggio](#)



[Bottone in ceramica/
plastica per i denti
anteriori per preservare
l'estetica](#)



[Bottone in metallo per
i denti posteriori](#)



[Pinza punzonatrice per i fori
nell'allineatore](#)



Elastico




Allineatore trasparente

Come usare gli intagli per bottoni degli allineatori

PAGINA 2 DI 5

Per gli intagli per bottone per le correzioni di classe II, fare riferimento a quanto segue:

1. Modificare l'allineatore (o gli allineatori) per preparare l'incollaggio dei bottoni: Usare una pinza punzonatrice per fori o una fresa acrilica o diamantata, per rimuovere un'area semicircolare del margine gengivale dell'allineatore sopra al canino superiore e al primo molare inferiore, dove saranno incollati i bottoni.

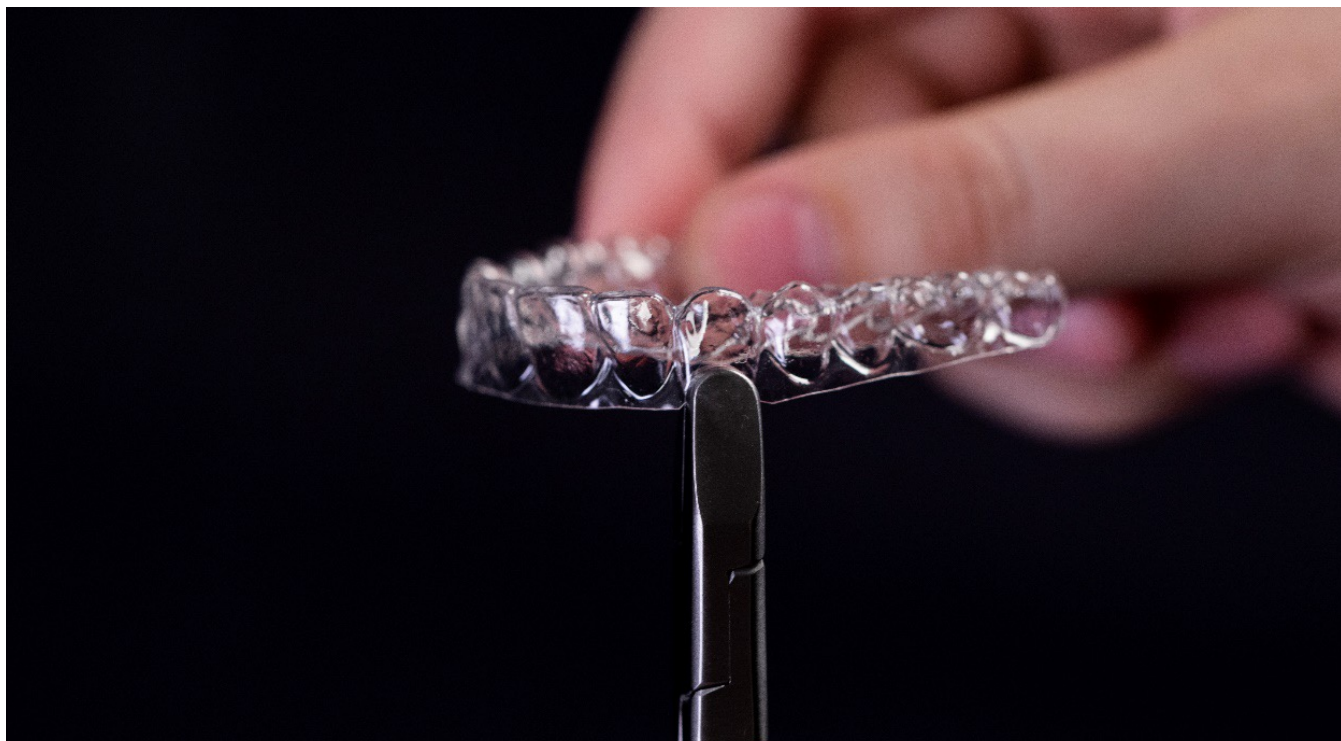

Intaglio per bottone sopra al canino dell'arcata superiore

2. Preparazione del dente con protocolli convenzionali di mordenzatura e incollaggio: Mordenzare l'area dei denti dove saranno posizionati i bottoni. Sciacquare per eliminare l'acido e asciugare con siringa ad aria/acqua.

3. Posizionamento del bottone: Incollare il bottone sul terzo cervicale delle corone cliniche, vicino al margine gengivale e centrato sui denti.

4. Posizionamento dell'elastico: Inserire l'allineatore e tendere l'elastico tra i bottoni facciali posizionati.

Come usare gli intagli per bottoni degli allineatori

PAGINA 3 DI 5



Intagli da bottone a bottone



Intagli da fessura a bottone

5. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.

L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe II è stata corretta o leggermente sovracorrecta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le recidive.

clearcorrect
A Straumann Group Brand


480.828_it_01/22

Come usare gli intagli per bottoni degli allineatori

PAGINA 4 DI 5

Per gli intagli per bottone per le correzioni di classe III, fare riferimento a quanto segue:

1. Modificare l'allineatore (o gli allineatori) per preparare l'incollaggio dei bottoni: Usare una pinza punzonatrice per fori o una fresa acrilica o diamantata, per rimuovere un'area semicircolare del margine gengivale dell'allineatore sopra al primo molare superiore e al canino inferiore, dove saranno incollati i bottoni.

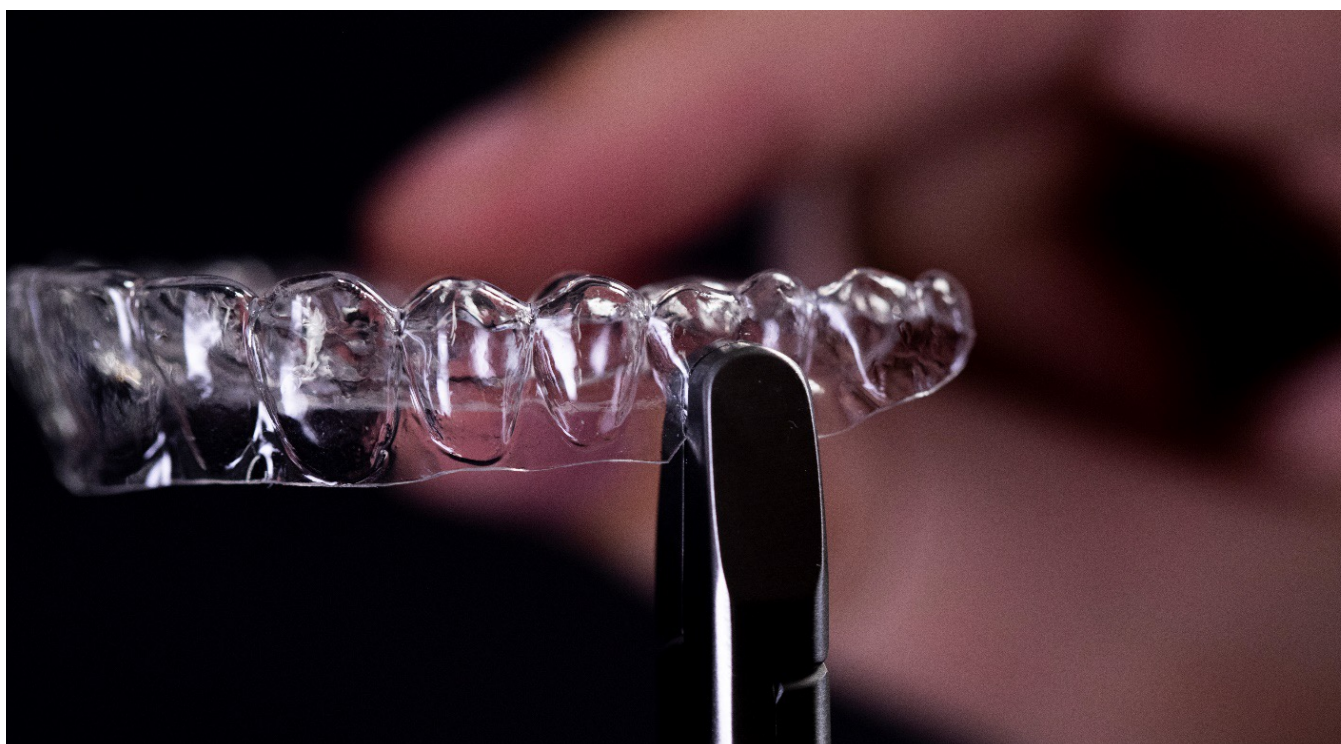

Intaglio per bottone sotto al primo molare dell'arcata inferiore

2. Preparazione del dente con protocolli convenzionali di mordenzatura e incollaggio: Mordenzare l'area dei denti dove saranno posizionati i bottoni. Sciacquare per eliminare l'acido e asciugare con siringa ad aria/acqua.

3. Posizionamento del bottone: Incollare il bottone sul terzo cervicale delle corone cliniche, vicino al margine gengivale e centrato sui denti.

4. Posizionamento dell'elastico: Inserire l'allineatore e tendere l'elastico tra i bottoni facciali posizionati.

Come usare gli intagli per bottoni degli allineatori

PAGINA 5 DI 5



Intagli da bottone a bottone



Intagli da fessura a bottone

5. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.

L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe II è stata corretta o leggermente sovracorrecta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le recidive.

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.828_it_01/22