

Come usare gli intagli per bottone degli allineatori

PAGINA 1 DI 4

Materiali e strumenti necessari per gli intagli a fessura:



[Pinza punzonatrice per le fessure degli allineatori](#)



Elastico



Allineatore trasparente

Per gli intagli a fessura per le correzioni di classe II, fare riferimento a quanto segue:

1. Modificare l'allineatore superiore (o gli allineatori) per l'uso di elastici negli intagli a fessura dell'allineatore: Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sopra ai canini superiori, dove si attaccherà l'elastico.



Doppio intaglio sopra al canino dell'arcata superiore

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_it_01/22

Come usare gli intagli per bottone degli allineatori

PAGINA 2 DI 4

2. Modificare l'allineatore inferiore per preparare l'uso di elastici con intagli a fessura nell'allineatore:

Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sotto ai molari.



Doppio intaglio sotto al primo molare dell'arcata inferiore

3. Posizionamento dell'elastico: Inserire l'allineatore e tirare l'elastico sul pezzo di margine gengivale tra le due fessure sopra ai canini. Poi tendere l'elastico e tirarlo sopra al margine gengivale tra le due fessure sotto ai molari inferiori.



Intaglio da fessura a fessura

4. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.

L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe II è stata corretta o leggermente sovracorrecta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le recidive.

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_it_01/22

Come usare gli intagli per bottone degli allineatori

PAGINA 3 DI 4


Per gli intagli a fessura per le correzioni di classe III, fare riferimento a quanto segue:

1. Modificare l'allineatore superiore (o gli allineatori) per l'uso di elastici negli intagli a fessura dell'allineatore: Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sopra ai molari superiori, dove si attaccherà l'elastico.



Doppio intaglio sopra al primo molare dell'arcata inferiore

2. Modificare l'allineatore inferiore per preparare l'uso di elastici con intagli a fessura nell'allineatore: Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sotto ai canini.

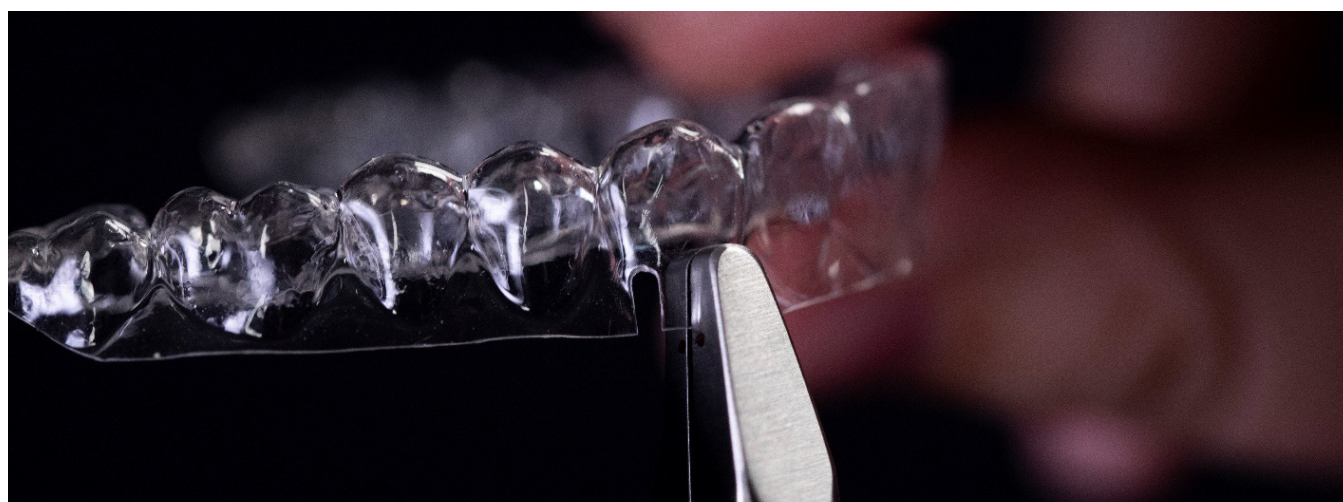

Doppio intaglio sopra al primo molare dell'arcata inferiore

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_it_01/22

Come usare gli intagli per bottone degli allineatori

PAGINA 4 DI 4

3. Posizionamento dell'elastico: Inserire l'allineatore e tirare l'elastico sul pezzo di margine gengivale tra le due fessure sopra ai molari. Poi tendere l'elastico e tirarlo sopra al margine gengivale tra le due fessure sotto ai canini inferiori.



Intaglio da fessura a fessura

4. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.

L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe III è stata corretta o leggermente sovracorrecta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le recidive.