


# So fertigen Sie einzeitige Abformungen an

SEITE 1 VON 2


Wir brauchen für jeden Fall klare, genau definierte Eindrücke beider Bögen. Genauigkeit ist wichtig, da wir diese Impressionen verwenden, um unser 3D-Modell zu erstellen und Ihre Behandlung einzurichten. Sie können die Technik verwenden, die Sie bevorzugen, aber wir haben mit der hier gezeigten Ein-Schritt-Technik großartige Ergebnisse erzielt.

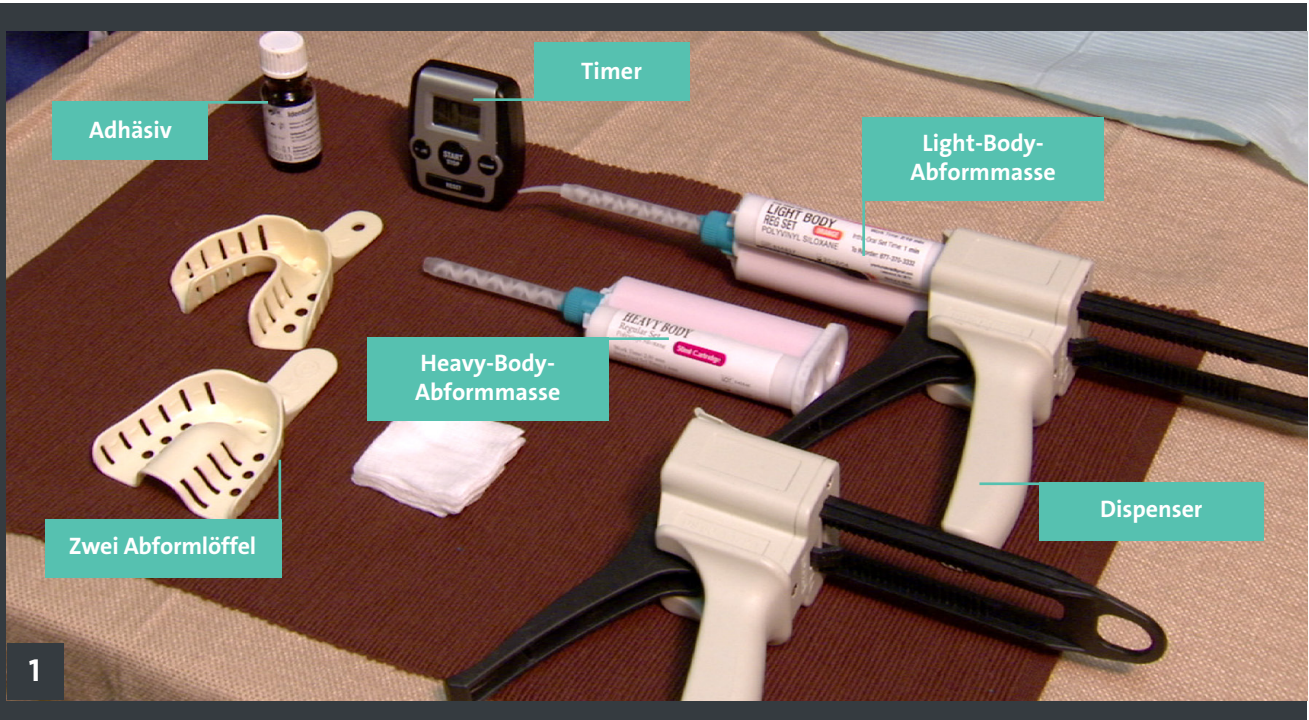

Stellen Sie sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen: Light-Body-Abformmasse, Heavy-Body-Abformmasse (Wir empfehlen ein reguläres Set für beide), Dispenser, Zwei Abformlöffel, Adhäsiv für Abformlöffel, und ein Timer. Möglicherweise müssen Sie auch Schere (zum Abschneiden von Heavy-Body- und Light-Body-Spitzen). Überprüfen Sie die Anweisungen für Ihr Abformmaterial, um Ihre Arbeits- und intraoralen Abbindezeiten zu bestätigen.



Achten Sie darauf, dass Sie einen Abformlöffel in der für den Mund des Patienten richtigen Größe ausgewählt haben. Der Abformlöffel sollte über den letzten Zahn im Bogen reichen, ohne das Zahnfleisch zu berühren.

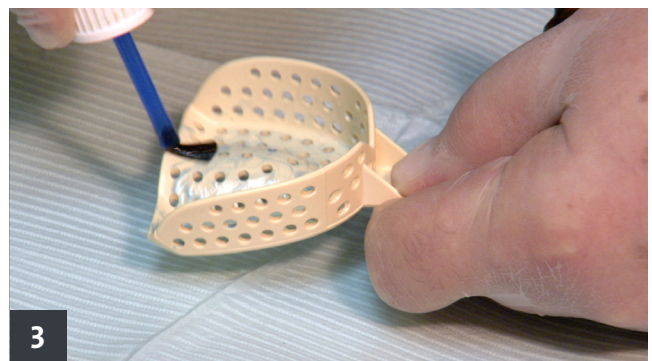

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die richtige Größe für den Mund Ihres Patienten haben, tragen Sie das Adhäsiv auf die Löffel auf. Dadurch wird verhindert, dass sich das Abformmaterial beim Entnehmen aus dem Mund vom Löffel löst.




# So fertigen Sie einzeitige Abformungen an

SEITE 2 VON 2



4

Legen Sie die Mischspitze in das Heavy-Body-Material und laden Sie es in den Dispenser. **Hinweis: Entsorgen Sie die ersten 2-3 Zentimeter Material bei jeder neuen Mischspitze.** Stellen Sie Ihren Timer auf die Verarbeitungszeit Ihres Materials ein und spritzen Sie dann das Heavy-Body-Material in den Löffel. Befüllen Sie den Löffel von einer Seite zur anderen. Heben Sie die Spitze nicht aus dem Material heraus, da sonst Luftblasen in der Abformung entstehen.

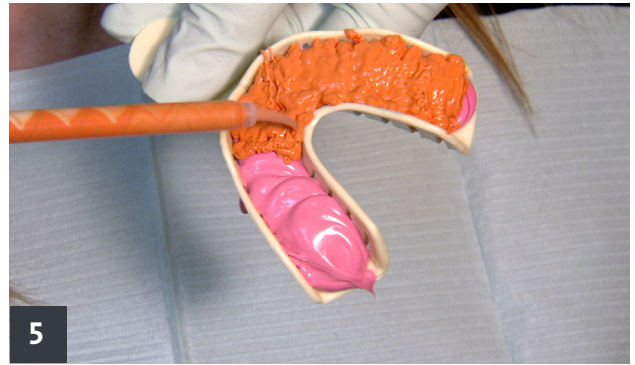

5

Nehmen Sie die Tube mit dem Heavy-Body-Abformmaterial aus dem Dispenser und beladen Sie es mit dem Light-Body-Material. Achten Sie darauf, die kleine Spitze zu verwenden, da die Mischung schnell fließen kann.

Befüllen Sie den Löffel von einer Seite zur anderen und decken Sie das Heavy-Body-Material vollständig ab. **Überfüllen Sie den Löffel nicht.**



6

Beginnen Sie mit der distalen Seite des letzten Zahns im Mund und arbeiten Sie sich nach mesial vor, um den Zahnbogen mit dem Light-Body-Material zu bedecken. Hören Sie auf, wenn Sie die mittleren Schneidezähne erreichen.



7

Gehen Sie zur anderen Seite des Mundes und beginnen Sie wieder mit der distalen Seite des letzten Zahns und arbeiten Sie sich nach mesial vor, um die restlichen Zähne im Bogen zu bedecken.



8

Drücken Sie den Löffel auf die Zähne, aber nicht zu fest – denn Sie ja möchten nicht, dass sich die Zähne durch das Abformmaterial drücken und den Löffel berühren. Stellen Sie Ihren Timer auf die intraorale Abbindezeit Ihres Light-Body-Materials ein und drücken Sie so lange auf den Löffel, bis die Abformung abgebunden ist.



9

Wenn Sie Ihre Abformung auf Qualität überprüfen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Alle Zähne sind eindeutig erfasst
- Es gibt keine Hohlräume oder Risse
- Es sind mindestens 5 mm Zahnfleischgewebe sichtbar
- Kein Zahn hat den Löffel berührt