

Legenda del piano di trattamento

Nome del paziente

Elyzabyth Lemon-Merenguez

Numero del caso · Tipo di piano
· Data

291585 · Unlimited · Aprile 15, 2019



Steps del piano di trattamento



Icone di trattamento



Revisione del caso

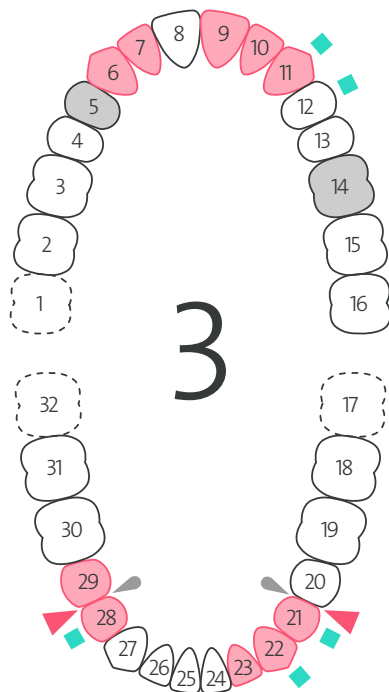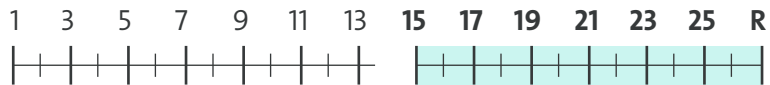

Un dente rosa è un dente che si sta muovendo.



Un dente grigio è un pontic.



Un dente punteggiato è un dente mancante.



Un quadrato alzavola rappresenta dove aggiungere un engager.



Il triangolo indica i denti tra i quali è necessario eseguire i IPR. Esistono triangoli di dimensioni diverse per rappresentare la dimensione dei IPR.



Una goccia grigio a forma di lacrima rappresenta i Controlli di conformità.



Un piccola X nera rappresenta la rimozione di un engager.