

# Como utilizar recortes de botões com alinhadores

## Materiais e instrumentos necessários para recortes de botões:



Ácido fosfórico a 35%



[Resina ortodôntica composta para colagem](#)



[Botão em cerâmica/  
plástico para dentes an-  
teriores para preservar a  
estética](#)



[Botão de metal para  
dentes posteriores](#)



[Alicate perfurador de alinha-  
dores](#)



Elástico




Alinhador transparente

# Como utilizar recortes de botões com alinhadores

PÁGINA 2 DE 5

**Para recortes de botões para correção de Classe II, consulte o seguinte:**

**1. Modificar o(s) alinhador(es) para se preparar para a colagem dos botões:** Use um alicate perfurador ou uma broca acrílica ou de diamante para remover uma área semicircular da margem gengival do alinhador acima do canino superior e do primeiro molar inferior, onde você vai colar botões.

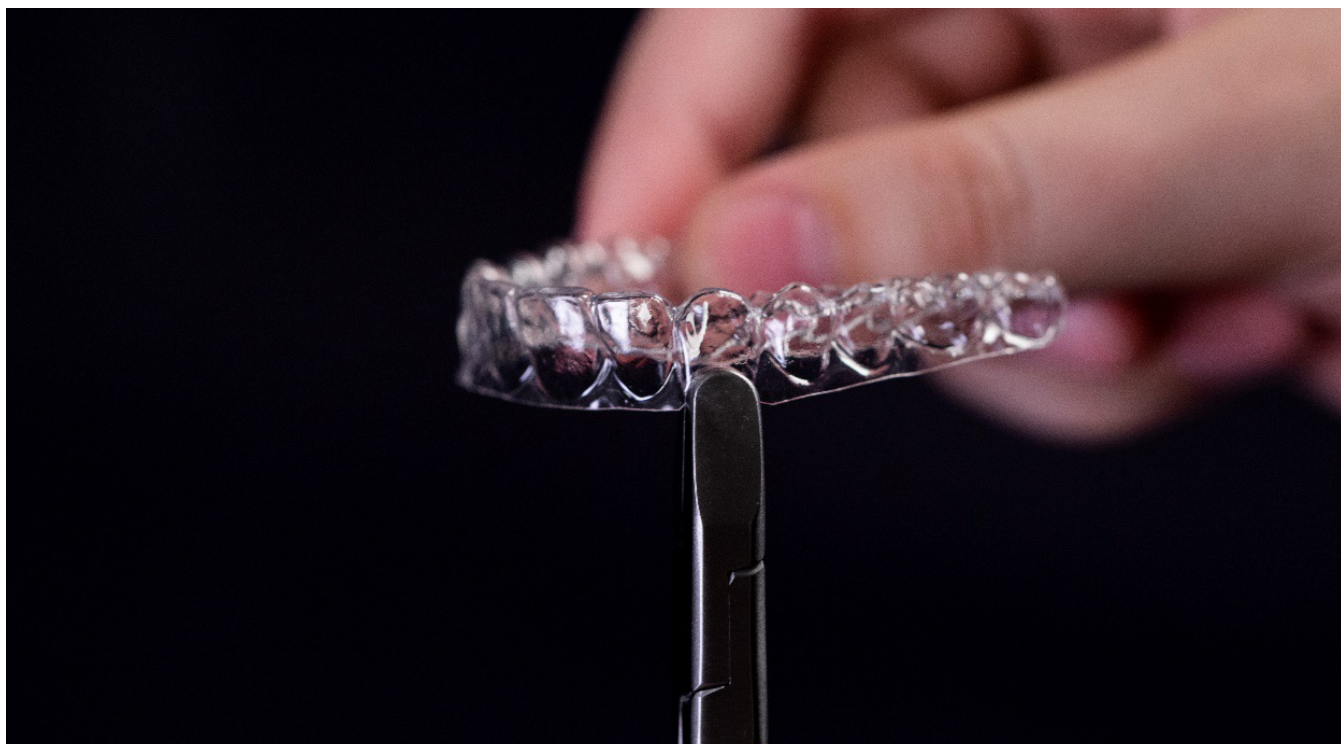

Recorte de botões acima do canino da arcada superior

**2. Preparação dos dentes utilizando protocolos convencionais de gravação e colagem:** Grave a área nos dentes onde os botões serão instalados. Enxágue o ácido e seque com a seringa de ar/água.

**3. Instalação dos botões:** Cole o botão ao terço cervical das coroas clínicas, próximo à margem gengival e centrado nos dentes.

**4. Instalação do elástico:** Insira o alinhador e estique o elástico entre os botões faciais que colocou.

# Como utilizar recortes de botões com alinhadores

PÁGINA 3 DE 5



Recortes de botão para botão



Recortes de fenda para botão

## 5. Monitore cuidadosamente o progresso da correção em cada consulta.


O elástico é usado até que a maloclusão Classe II seja corrigida ou levemente corrigida. A sobrecorreção pode ser planejada no setup também para evitar recidivas.

# Como utilizar recortes de botões com alinhadores

PÁGINA 4 DE 5

## Para recortes de botões para correção de Classe III, consulte o seguinte:

**1. Modificar o(s) alinhador(es) para se preparar para a colagem dos botões:** Use um alicate perfurador ou uma broca acrílica ou de diamante para remover uma área semicircular da margem gengival do alinhador acima do primeiro molar superior e do canino inferior, onde você vai colar botões.

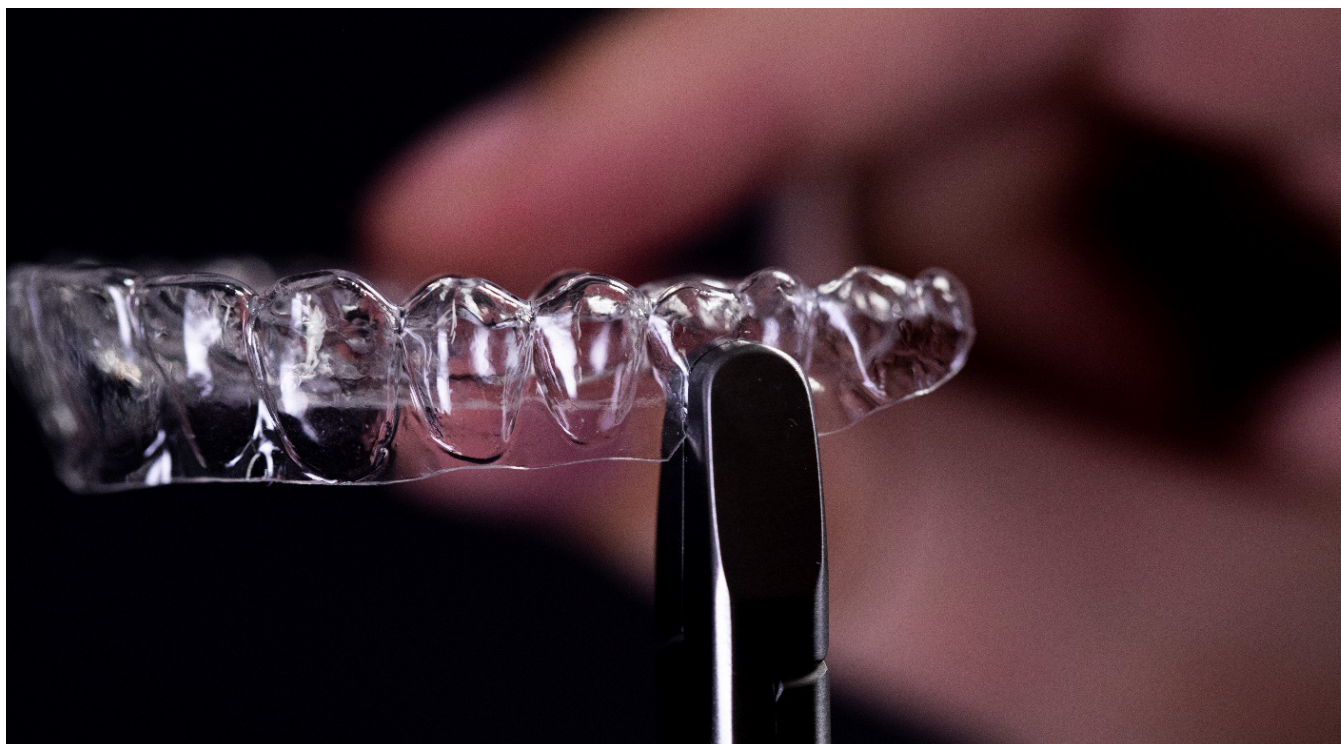

Recorte do botão abaixo do primeiro molar da arcada inferior

**2. Preparação dos dentes utilizando protocolos convencionais de gravação e colagem:** Grave a área nos dentes onde os botões serão instalados. Enxágue o ácido e seque com a seringa de ar/água.

**3. Instalação dos botões:** Cole o botão ao terço cervical das coroas clínicas, próximo à margem gengival e centrado nos dentes.

**4. Instalação do elástico:** Insira o alinhador e estique o elástico entre os botões faciais que colocou.

# Como utilizar recortes de botões com alinhadores

PÁGINA 5 DE 5



Recortes de botão para botão



Recortes de fenda para botão

## 5. Monitore cuidadosamente o progresso da correção em cada consulta.

O elástico é usado até que a maloclusão Classe II seja corrigida ou levemente corrigida. A sobrecorreção pode ser planejada no setup também para evitar recidivas.