

Verwendung von Schlitz-Cutouts bei Alignern

SEITE 1 VON 4

Für Schlitz-Cutouts benötigte Materialien und Instrumente:



[Aligner-Schlitzstanze](#)



Gummiband



Aligner

So nehmen Sie Schlitz-Cutouts für Klasse-II-Korrekturen vor:

1. Modifizieren Sie den Aligner für den Oberkiefer, um die Verwendung von Gummis mit Schlitz-Cutouts vorzubereiten: Erstellen Sie mit einer Aligner-Schlitzstanze einen doppelten Schlitz am Gingivarand über den Oberkiefer-Eckzähnen, d. h. dort, wo das Gummi befestigt wird.



Doppelter Schlitz-Cutout über dem Oberkiefer-Eckzahn

Verwendung von Schlitz-Cutouts bei Alignern

SEITE 2 VON 4

2. Modifizieren Sie den Aligner für den Unterkiefer, um die Verwendung von Gummis mit Schlitz-Cutouts vorzubereiten: Erstellen Sie mit einer Aligner-Schlitzstanze einen doppelten Schlitz am Gingivarand unter den Molaren.



Doppelter Schlitz-Cutout unter dem ersten Unterkiefer-Molaren

3. Platzierung des Gummis: Setzen Sie den Aligner ein und ziehen Sie das Gummi über das Stück Gingivarand zwischen den beiden Schlitzten oberhalb der Eckzähne. Ziehen Sie dann das Gummi über den Gingivarand zwischen den beiden Schlitzten unterhalb der Unterkiefer-Molaren.



Schlitz- zu Schlitz-Cutout

4. Kontrollieren Sie den Fortschritt der Korrektur bei jedem Termin.

Das Gummi wird getragen, bis die Klasse-II-Fehlstellung korrigiert oder leicht überkorrigiert ist. In der Fallplanung kann eine Überkorrektur eingeplant werden, um einem Rezidiv vorzubeugen.

clearcorrect
A Straumann Group Brand

480.870_de_01 01/22

Verwendung von Schlitz-Cutouts bei Alignern

SEITE 3 VON 4


So nehmen Sie Schlitz-Cutouts für Klasse-III-Korrekturen vor:

1. Modifizieren Sie den Aligner für den Oberkiefer, um die Verwendung von Gummis mit Schlitz-Cutouts vorzubereiten: Erstellen Sie mit einer Aligner-Schlitzstanze einen doppelten Schlitz am Gingivarand über den Oberkiefer-Molaren, d. h. dort, wo das Gummi befestigt wird.



Doppelter Schlitz Cut Out über dem ersten Oberkiefer-Molaren

2. Modifizieren Sie den Aligner für den Unterkiefer, um die Verwendung von Gummis mit Schlitz-Cutouts vorzubereiten: Erstellen Sie mit einer Aligner-Schlitzstanze einen doppelten Schlitz am Gingivarand unter den Eckzähnen.

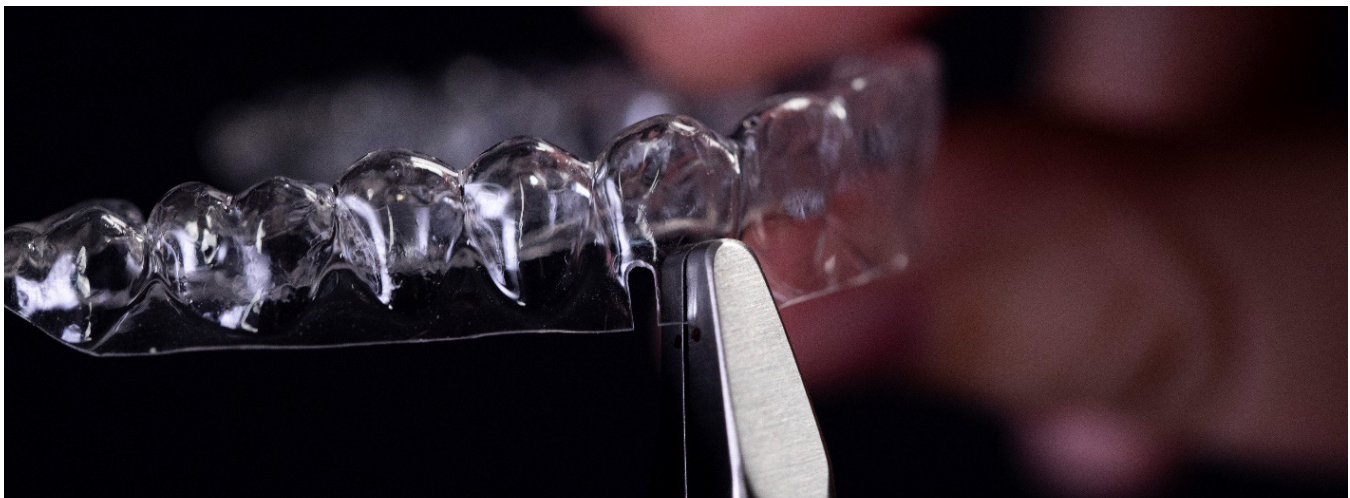

Doppelter Schlitz-Cutout über dem ersten Oberkiefer-Molaren

Verwendung von Schlitz-Cutouts bei Alignern

SEITE 4 VON 4

3. Platzierung des Gummis: Setzen Sie den Aligner ein und ziehen Sie das Gummi über das Stück Gingivarand zwischen den beiden Schlitzten oberhalb der Molaren. Ziehen Sie dann das Gummi über den Gingivarand zwischen den beiden Schlitzten unterhalb der Unterkiefer-Eckzähne.



Schlitz- zu Schlitz-Cutout

4. Kontrollieren Sie den Fortschritt der Korrektur bei jedem Termin.

Das Gummi wird getragen, bis die Klasse-III-Fehlstellung korrigiert oder leicht überkorrigiert ist. In der Fallplanung kann eine Überkorrektur eingeplant werden, um einem Rezidiv vorzubeugen.